



munevo Smartglass interruptor encendido/apagado




- El botón de encendido se encuentra en el auricular derecho, detrás de la oreja derecha.
- Mantenga pulsado durante 2 segundos para encender o a p a g a r

carga munevo Smartglass



- Conecte el cable de carga USB (enchufe USB blanco y negro) a la fuente de alimentación proporcionada.
- Ahora conecte el otro extremo del cable a las gafas.

Quitar y reemplazar el marco de las gafas.

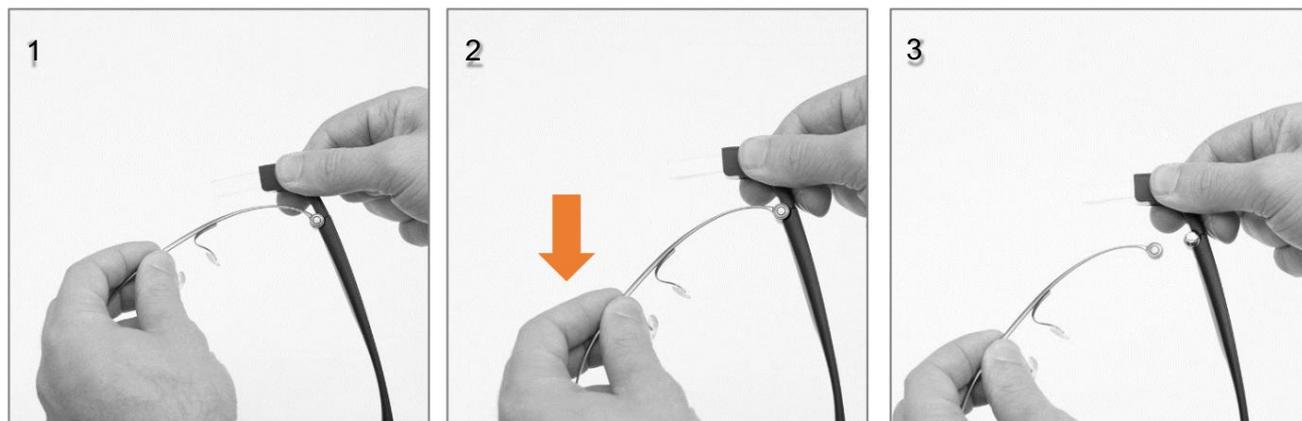

- Sujete las gafas como se muestra en "1" con la mano derecha justo detrás de la "pantalla".
- Con la mano izquierda, doble el marco hacia usted.
- Ahora puedes reemplazar el marco por otro.
- Coloque el marco:
 - o Coloque el marco nuevamente en la articulación y dóblelo hacia adelante hasta que haga clic. en su lugar.


gestos

1. Menú-gestos



Asentir verticalmente (asentir con la cabeza, "Sí")

- Abajo - Selección de menú/Confirmar y activar conducción
- Arriba - volver al menú anterior

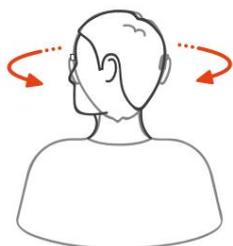

Asentimiento horizontal (sin movimiento)

- Derecha: opción de menú siguiente.
- Izquierda: opción de menú anterior.

2. Gestos de conducción



Levantarse

- Acelerar, avanzar o retroceder dependiendo de modo



Inclinar hacia los lados

- Girar la silla de ruedas

3. Bloquear/Desbloquear



Incline hacia la derecha durante 3 segundos -> bloquear

Incline hacia la izquierda durante 3 segundos -> desbloquear